

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S	製造番号: 300349
作業年月日	平成 27 年 7 月 3 日	作業時間: Hr
顧客名	成田内科	TEL: 0282-22-3722
所在地	栃木県栃木市河合町7-9	担当 様
販売店		担当 様
納入年月日	平成 26 年 7 月 31 日 保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目	定期点検シール記入 ☒
出張 / 引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合、異常なし

不具合原因、作業内容

OED-1000S定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常	☒
酸素ライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒
給水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒
水位センサー	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒
清掃	正常	☒
トレー	正常	☒
消毒槽コネクタ	正常	☒

消毒槽 LED	正常	☒
エアライン	正常	☒
オゾン水濃度計動作	正常	☒
排水栓、排水ライン	正常	☒
細管送水ライン	正常	☒
排気ライン	正常	☒
オゾン濃度	正常	☒
異常音、振動	正常	☒
電源コード	正常	☒
消毒チューブ類	正常	☒

バルブ数 5/9

0.70 ppm

オゾン水 290

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

チューブ接続コネクタが壊れて部品に変更、アルコールタンクキャップ破損の為交換、予備の消毒槽が圧が非常に低く、吸込スピードが早い。

装置 情報	交換後運転回数: 195	更新（リセット）実施・未実施	消毒: 31	消毒+7L: 164
	リークチェック: 193	自己洗浄: 126	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		内視鏡接続コネクタ		☒	2
排水栓		☐		吸込用経路フィルター		☒	1
オゾン水濃度計		☐		アルコールタンクキャップ		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☐				☐	
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

27 年 7 月 3 日

ご署名

横倉

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

