

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 年 月 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100272
作業年月日	平成27年7月15日		作業時間:	1.5 Hr
顧客名	興島病院		TEL:	042-360-0033
所在地	東京都府中市美好町1-22		担当	様
販売店	サンメテック株式会社		担当	様
納入年月日	平成23年7月11日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	4年4回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合、異常はなし

不具合原因、作業内容

定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 727
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	オゾンパル	正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

チューブ接続コネクタが灰色の部品に変更

装置情報	交換後運転回数: 108	更新（リセット）実施・未実施	殺菌: 158	殺菌+7L: 403
	リークチェック: 0	自己洗浄: 151	7Lコル単独: 32	エア単独: 4

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン濃度計 Assy		☒	1	コネクタ継手（本体側）		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	コネクタ継手（コネクタ側）		☒	1
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27年 7 月 15 日

ご署名 本下

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

西野

山本