

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号 : 300059
作業年月日	平成 27 年 7 月 24 日		作業時間 : 約 1.5 Hr
顧客名	加藤医院 様		TEL : 0467-82-2602
所在地	神奈川県茅ヶ崎市東海岸北2-1-52		担当 様
販売店	株式会社 二葉医科器械		担当 様
納入年月日	平成 25 年 8 月 23 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2 年 2 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

OED-1000S定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	消毒槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 453
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒チューブ類	正常 ☒
消毒槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

※定期点検保守パック作業実施。下記記載部品の交換。作動確認実施。
異常履歴も消去しました。

装置情報	交換後運転回数 : 546⇒0 更新 (リセット) 実施 : 未実施	消毒 : 626	消毒+7% : 579
	リークチェック : 0	自己洗浄 : 402	アルコール単独 : 0
			エア単独 : 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	1
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H27 年 7 月 24 日

新鋭工業株式会社 加藤医院 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL : 03-3816-0444

責任技術者

作業者

