

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

|       |                                                                                 |                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                                                             | 製造番号：100588                                                           |
| 作業年月日 | 平成 27 年 8 月 6 日                                                                 | 作業時間： Hr                                                              |
| 顧客名   | 飯能市東吾野医療介護センター                                                                  | TEL：042-978-2000                                                      |
| 所在地   | 埼玉県飯能市大字虎秀25-1                                                                  | 担当 様                                                                  |
| 販売店   | 日本メガケア株式会社                                                                      | 担当 様                                                                  |
| 納入年月日 | 平成 24 年 10 月 31 日                                                               | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 3 年 2 回目 | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>                         |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>                                                     | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                       |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合、異常はなし

不具合原因、作業内容

OED-1000定期保守点検作業実施 . ショーキング説明 .

点検項目

|          |                                                                    |           |                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルス数 479    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.67 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン/1分    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

4-7 掃除 1分14秒 4分50秒 1分14秒 毎週火曜日 4分50秒 2-3分 2分

|      |              |                |            |            |
|------|--------------|----------------|------------|------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数： 115 | 更新（リセット）実施・未実施 | 殺菌： 72     | 殺菌+アル： 194 |
|      | リークチェック： 0   | 自己洗浄： 117      | アルコール単独： 2 | エア単独： 0    |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 内視鏡接続コネクタ    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 3-7分14秒 4-7分 |       | <input type="checkbox"/>            | 1  |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H 27 年 8 月 6 日

ご署名 横手 亜紀 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店  
東京都文京区本郷3-12-5  
TEL：03-3816-0444

責任技術者

作業者

