

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____
発行日 _____

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100526
作業年月日	平成 27 年 8 月 10 日		作業時間: _____ Hr
顧客名	住吉クリニック病院		TEL: 029-247-2251
所在地	茨城県水戸市住吉町193-97		担当 _____ 様
販売店			担当 _____ 様
納入年月日	平成 24 年 9 月 7 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3 年 3 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴
不具合、異常はなし

不具合原因、作業内容
OED-1000定期保守点検作業実施

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 5ヶ所
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	7ヶ所	正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
チューブ接続箇所が破損していたため、使用後はアルコールで洗浄して封入。
次回日 11.28. 2~3 月頃 7ヶ所 - 交換予定

装置 情報	交換後運転回数: 899	更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	殺菌: 3020	殺菌+7L: 0
	リークチェック: /	自己洗浄: 232	アルコール単独: 0	エア単独: 6

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/	内視鏡接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	/			☐	
オゾン水濃度計		☒	/			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	/			☐	
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27 年 8 月 10 日
ご署名 山本元津男 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷 3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
	