

保守点検・修理 報告書

管理 No

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100525
作業年月日	平成 27 年 6 月 30 日		作業時間: Hr
顧客名	かどた内科クリニック		TEL: 03-5604-1517
所在地	東京都荒川区南千住4-7-1 BiVi南千住3F		担当 様
販売店	株式会社スズケン		担当 様
納入年月日	平成 24 年 7 月 26 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 ☐ 回目	定期点検シール記入 ☒	
☒ 出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合. 異常なし

不具合原因、作業内容

OED-1000定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 5ヶ所
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒ 未交換 7ヶ所
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☒
			清掃	☐	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

チューブ接続コネクタが灰色の部品に変更、スコ-70接続のフィルタ用コネクタは赤(4514)がX77栓. 青(送水送水)に左-70が接続が注意して下さい.

装置情報	交換後運転回数: 1165	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 62ヶ	殺菌+7ル: 1501
	リークチェック: 0	自己洗浄: 665	7ルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2015 年 6 月 30 日

ご署名 松井 知恵 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

