

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100106
作業年月日	平成 27 年 6 月 3 日		作業時間: Hr
顧客名	つのだ医院		TEL: 045-790-3676
所在地	神奈川県横浜市金沢区能見台通1-2白樺ビル3F		担当 様
販売店			担当 様
納入年月日	平成 22 年 6 月 22 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐ 5 年 5 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合、異常は物に存在し

不具合原因、作業内容

OED-1000定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック 正常 ☒
 酸素ライン 正常 ☒
 アルコールライン 正常 ☒
 オゾンセンサ 正常 ☒
 給水ライン 正常 ☒
 濃度計流量 正常 ☒
 水位センサー 正常 ☒
 水漏れ確認 正常 ☒
 清掃 正常 ☒
 トレー 正常 ☒
 殺菌槽コネクタ 正常 ☒

清掃 ☐

殺菌槽 LED 正常 ☒
 エアライン 正常 ☒
 オゾン水濃度計動作 正常 ☒
 排水栓、排水ライン 正常 ☒
 細管送水ライン 正常 ☒
 排気ライン 正常 ☒
 オゾン濃度 正常 ☒
 異常音、振動 正常 ☒
 電源コード 正常 ☒
 殺菌チューブ類 正常 ☒

バルブ数 478

履歴 0.69 ppm

7.7/11/11

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

チューブ接続 コネクター 2個の交換

装置 情報	交換後運転回数: 4/6	更新（リセット）実施・未実施	殺菌: 66	殺菌+7L: 2222
	リークチェック: 1/0	自己洗浄: 1267	7Lアルコール単独:	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2015 年 6 月 3 日

ご署名 足立 文子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
 東京都文京区本郷 3-12-5
 TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

