

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S	製造番号: 300291
作業年月日	平成 27 年 6 月 5 日	作業時間: Hr
顧客名	松川内科クリニック	TEL: 0422-70-5525
所在地	東京都三鷹市井の頭2-1-17石伊ビル二階	担当 様
販売店		担当 様
納入年月日	平成 26 年 6 月 4 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目	定期点検シール記入 ☒
☒ 出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

2/23 12:40 光量低下異常 / (1:210) テンブ切れ異常 (1:212)

不具合原因、作業内容

OED-1000S定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常	☒	消毒槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 550
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	消毒チューブ類	正常	☒
消毒槽コネクタ	正常	☒	7.7.11	正常	☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

シーブ接続ボルトが緩み部品交換

装置 情報	交換後運転回数: 397	更新（リセット）実施・未実施	消毒: 80	消毒+7L: 317
	リークチェック: 0	自己洗浄: 93	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/	内視鏡接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	/			☐	
オゾン水濃度計		☒	/			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	/			☐	
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27 年 6 月 5 日

ご署名

松川 義孝

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

