

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 100226
作業年月日	平成 27 年 5 月 13 日	作業時間: 約 1.5 Hr
顧客名	石山医院	TEL: 042-590-5688
所在地	東京都東大和市南郷1-32-4 1F	担当 様
販売店	株式会社メディセオ	担当 様
納入年月日	平成 23 年 5 月 30 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4 年 3 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

OED-1000定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☐	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

バルブ数 305
履歴 0.72 ppm
清掃 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

下記交換部品交換、作動確認実施。アルコールタンクキャップとビニールの為交換しました。
異常は消去しました。(リセット)

装置 情報	交換後運転回数: 27530 (更新 (リセット) 実施・未実施)	殺菌: 655	殺菌+7L: 521
	リークチェック: 0	自己洗浄: 170	アルコール単独: 11
			エア単独: 15

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	1
排水栓		☒	1	アルコールタンクキャップ	(ビニールの為)	☒	1
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

H27 年 5 月 13 日
〒207-0014 東京都東大和市南郷1-32-4

医療法人 石山医院
TEL042-590-5688 FAX042-590-5688

ご署名 医師 石山 純

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
西野	土屋