

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 3 年 6 月 22 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 500283
作業年月日	令和 3 年 6 月 23 日		作業時間: Hr
顧客名	竹村内科クリニック 様		TEL: 0289-60-7577
所在地	栃木県鹿沼市西茂呂 4-46-3		ご担当 様
販売店	日成 X ディカル		ご担当 夕方 1 様
納入年月日	2019 年 5 月 23 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒		付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2 年 2 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E:110 207 オゾン水生成状況異常
E:202 消毒時給水異常

不具合原因、作業内容

定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 126
オゾンセンサ	正常 ☒ 0	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
消掃	正常 ☒ 消掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver 030417RA

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題はありません。

装置情報	交換後運転回数: 221 / 更新 (リフト) 実施 ☒ 未実施 ☐	消毒(総運転回数): 278 / 消毒(洗剤洗浄あり): 273
	消毒+アル(総運転回数): 148	消毒+アル(洗剤洗浄あり): 148
	リークチェック: 0	自己洗浄: 136 / 7Aコ-ル単独: 0 / エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 3
交換後 No.			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☒ 1
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ: チューブ側	☒ 1	水フィルター	☒ 1
	☐		オゾン水濃度計用フィル	☒ 1		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 山口 英治 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
西野	西野