

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和 3 年 6 月 21 日

|       |                                                                                                                                |                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input checked="" type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input type="checkbox"/>                          | 製造番号： 100482      |
| 作業年月日 | 令和 3 年 6 月 25 日                                                                                                                | 作業時間： Hr          |
| 顧客名   | 砂長胃腸科外科医院 様                                                                                                                    | TEL： 027-373-2263 |
| 所在地   | 群馬県高崎市稲荷台町1305-1                                                                                                               | ご担当 石井 様          |
| 販売店   | 株式会社 IDK                                                                                                                       | ご担当 様             |
| 納入年月日 | 2012 年 5 月 1 日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>                                           | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 9 年 12 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>         |                   |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

3/8 E200 消毒時給水量異常

不具合原因、作業内容

定期保守点検作業実施

点検項目

|          |                                                                    |              |                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルス数 376    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 0~1                         | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレー      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
|          | <input type="checkbox"/>                                           |              | <input type="checkbox"/>                           |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

|          |                              |              |                |
|----------|------------------------------|--------------|----------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数： 1814 更新（リセット）実施・未実施 | 殺菌/消毒： 16024 | 殺菌/消毒+7L： 1697 |
|          | リークチェック： 0 自己洗浄： 45          | 7Lコール単独： 19  | エア単独： 180      |

| 交換部品名称        | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称         | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|---------------|-------|-------------------------------------|----|----------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒       |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤             |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 排水栓           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：水槽/チューブ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン水濃度計       |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 給水・排水フィルター     | 糸巻き   | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾン水濃度計用フィルター |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | マニホールド周辺チューブ   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾンセンサー       |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |                |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

3 年 6 月 25 日

ご署名

田中 博明

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 東京支店  
東京都文京区本郷3-12-5  
TEL：03-3816-0444

責任技術者

作業者



Ver.3.1