

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-79159

No. 210628

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿		機種	OED-1000S
客先	顧客名	吉行医院 様		機番	301126
環営	所在地	東京都文京区千駄木 2-34-10		納入日	2017年04月26日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	2021年06月14日
	返送先	納入先と同じ		出荷日	2021年06月16日
計	3				

修理依頼・不具合内容

水槽下側より少量の水漏れ※

※ 6/10 新鋭工業殿が保守点検時に発見しました。

不具合原因（故障箇所）と処置予定

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

水槽に水を張って一晩静置しましたが水漏れせず、「消毒」モードで20回運転しましたが水漏れは再現ませんでした。

過去の事例から、水槽のパッキンが劣化するとこの現象が起きることからパッキン一式を交換いたしました。

写真：交換部品一式



〔2〕修理・点検内容

- 1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.69 ppm・・・正常
- 3：出荷時の装置情報

交換後運転回数：373→0 殺菌：6、殺菌＋アルコール：778、リークチェック：0

自己洗浄：743、アルコール単独：0、エア単独：2

—以上—

交換部品

承認				
松永				
審査				
中澤				
作成				
R03.6.28	部品番号	部品名称	数量	備考
中澤	1	ドレンバルブ側パッキン、ナット	1式	
	2	コントロール基板（調査のため）	1枚	交換後 Ver0209/T05C

（株）IHIアグリテック（旧社名 IHIパワウ）

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528