

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和 3 年 7 月 29 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 301407
作業年月日	令和 3 年 8 月 18 日		作業時間： Hr
顧客名	新座内科おなかクリニック 様		TEL： 048-424-5055
所在地	埼玉県新座市馬場1-4-17		ご担当 様
販売店	日本光電工業株式会社		ご担当 様
納入年月日	2018 年 3 月 8 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3 年 / 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
5/22 9:12 F200 8/23 13:31 F200 7/22 14:23 E: F03			
不具合原因、作業内容			
定期保守点検作業実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ パルス数 508
オゾンセンサ	正常 ☒ 0.12	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒ 007911	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
問題ありません。			

装置 情報	交換後運転回数： 1209	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 383	殺菌/消毒+7L： 826
	リークチェック： 0	自己洗浄： 486	7Lアルコール単独： 1	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽/チューブ		☒	2
ワゴン水濃度計		☒	1	給水・排水フィルター	糸巻き	☐	
ワゴン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

齋藤 育美

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL：03-3816-0444

責任技術者	作業者