

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20210922
発行日：2021年 9 月 22 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ■		製造番号： 100775
作業年月日	令和 3 年 9 月 14 日		作業時間： Hr
顧客名	かわぐちクリニック 様		TEL： 0423-97-3741
所在地	東京都東村山市本町2-3-2		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2013年 6 月 6 日	保証期間 内 □ 外 □	付属品
作業区分 引取	保守点検 ■ 総合点検 ■	年 回目	定期点検シール記入 □
	修理 □ 点検のみ □	その他 □	修理表示貼付 ■

不具合状況、依頼内容			
定期保守点検およびオーバーホール依頼			
不具合原因、作業内容			
定期交換交換部品を含めてオーバーホールを実施いたしました。			
点検項目			
フタロック	正常 ■	殺菌槽 LED	正常 ■
酸素ライン	正常 ■	エアライン	正常 ■
アルコールライン	正常 ■	オゾン水濃度計動作	正常 ■ ハール数 901
オゾンセンサ	正常 ■	排水栓、排水ライン	正常 ■
給水ライン	正常 ■	細管送水ライン	正常 ■
濃度計流量	正常 ■	排気ライン	正常 ■
水位センサー	正常 ■	オゾン濃度	正常 ■ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ■	異常音、振動	正常 ■
清掃	正常 ■ 清掃 ■	電源コード	正常 □
トレイ	正常 ■	殺菌チューブ類	正常 □
殺菌槽コネクタ	正常 ■	マニホールド周辺チューブ	正常 ■
□		運転プログラムバージョン	正常 ■ Ver. 0209/T05C
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常ありませんでした。			

装置 情報	交換後運転回数：		更新（リセット）実施 ・ 未実施		殺菌/消毒：	5640	殺菌/消毒＋アル：	5168
	リークチェック：	4	自己洗浄：	1615	アルコール単独：	1	エア単独：	2


交換部品名称	見積部品No	交換	数量	交換部品名称	見積部品No	交換	数量
定期交換部品	1	■	1 式	ヒーターASSY	7	■	1 式
エポソフ	2	■	1 台	水槽	8	■	1 式
排気ファン	3	■	1 台	コントロール基板	9	■	1 式
ドレンバルブ ASSY	4	■	1 式	24V電源	10	■	1 式
給水電磁弁	5	■	2個			□	
配管パッキン、チューブ	6	■	1 式			□	

機械出荷日：2021年9月14日			
------------------	--	--	--


修理業者 株式会社 I H I 物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地 1 7 0 - 6
TEL:086-944-6528

責任技術者	作業者
	宮宗

1:定期交換部品

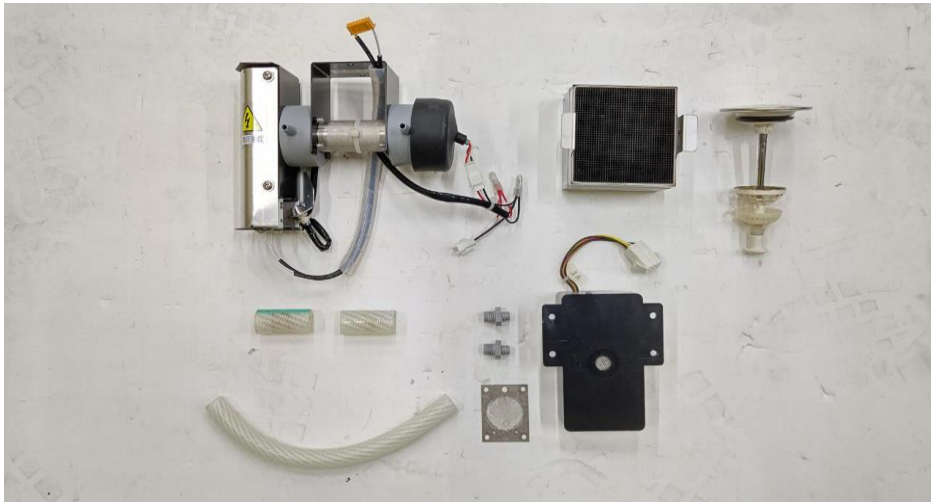


2:エアポンプ、配管チューブ

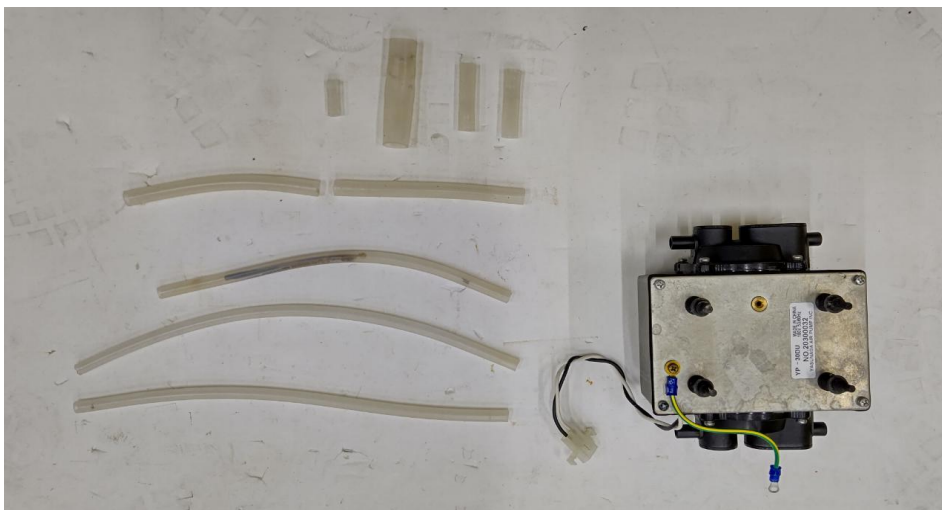

3:ドレンバルブASSY



4: DCモータ、カム、24V電源、排気ファン、ヒーターASSY、コントロール基板、給水電磁弁、パッキン

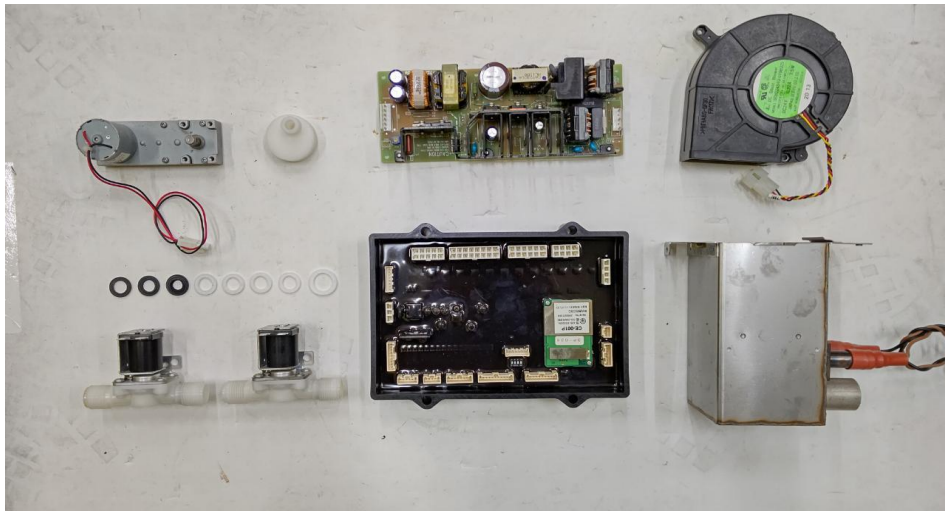

5:水槽

