

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和 3 年 10 月 12 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号	500632
作業年月日	令和 3 年 10 月 19 日		作業時間	Hr
顧客名	大宮エヴァグリーンクリニック 様		TEL	048-647-3203
所在地	埼玉県さいたま市大宮区下町2-16-1 アクロスビル3F		ご担当	検査科 田中 様
販売店	株式会社 メディセオ		ご担当	ME 堀田 様
納入年月日	2021 年 2 月 16 日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目	定期点検シール記入 ☒		
出張/引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴
定期メンテナンス実施案内の発報

不具合原因、作業内容
定期保守点検作業実施

点検項目			
フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 808
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0304 / 712A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題はありません。今回は無償となります。

装置 情報	交換後運転回数：1602 更新（リセット）実施・未実施	消毒（総運転回数）：1209 / 消毒（洗剤洗浄あり）：0	
	消毒+アル（総運転回数）：393	消毒+アル（洗剤洗浄あり）：0	
	リークチェック：0	自己洗浄：209	アルコール単独：11

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 3
交換後 No.			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ（チューブ側）	☐	水フィルター	☒ 1
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 10 月 19 日

ご署名 田中 紀子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL : 03-3816-0444

責任技術者 作業者

