

# 修理報告書 (引取り修理)

修理依頼番号	02-79269	No. 210903
--------	----------	------------

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿	機種	OED-1000S Plus
客先	顧客名	楓クリニック 様	機番	500007
環営	所在地	東京都立川市泉町 935 番地の 1	納入日	2018 年 08 月 21 日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	
			受付日	2021 年 08 月 17 日
計	返送先	納入先と同じ	出荷日	2021 年 08 月 26 日

## 修理依頼・不具合内容

電源が入らない

## 不具合原因 (故障箇所) と処置

修理遅れまして、大変申し訳ありませんでした。下記の通りご報告いたします。

### [1] 点検結果 (不具合箇所と不具合原因)

直流電源が故障して、タッチパネル及び圧力センサーに電源が入らない状態でした。分解点検したところ、直流電源に溶液が付着しており、洗剤 (アイエスウォッシュ) であることが判明しました。こぼれた洗剤がカバーを浸透して機械内部の直流電源にかかったものと推察いたします。

写真 1 : 洗剤の浸透経路



写真 2 : 電源カバー



写真 3 : 直流電源



### [2] 修理・点検内容

- 1 : 部品交換・写真と下表をご参照ください
- 2 : オゾン水濃度測定 (規定値  $0.7 \pm 0.2$  ppm) : 0.71 ppm ・ ・ 正常
- 3 : 装置情報

交換後運転回数 : 4 消毒 : 20/15、消毒+アルコール : 309/309、リークチェック : 0  
自己洗浄 : 8、アルコール単独 : 0、エア単独 : 6

## 交換部品

承認	松永
審査	中澤
作成	R03.9.3 中澤

部品番号	部品名称	数量	備考
1	直流電源	1台	