

保守点検・修理 報告書

発行日：平成 28 年 4 月 20 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300762
作業年月日	平成 28 年 4 月 20 日		作業時間： Hr
顧客名	はまだ内科クリニック 様		TEL： 049-268-7100
所在地	埼玉県富士見市東みずほ台3-24-6		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	平成 28 年 3 月 7 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☒ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

4/23 「消毒+AL」運転で異音発生。この日の他に3月中に2回発生した
 13 異音の大きさは隣の洗濯機の動作音を聞き消すほど大きい。キルキル音

不具合原因、作業内容

メインポンプ、排水ポンプ、エアポンプが音の原因と考えられるが、
 5回運転しても再現しませんでした。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ ポンプ残 11.6	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 —
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 (6.7) ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

発生確立の高い排水ポンプで交換しました。

装置情報	交換後運転回数： 77	更新（リセット）実施・未実施 ☒	殺菌/消毒： 48	殺菌/消毒+AL： 29
	リークチェック： 0	自己洗浄： 28	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ；水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☐		接続コネクタ；チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐		排水ポンプ		☒	1台
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

28 年 4 月 20 日

ご署名 斎藤大輔 印

修理業者 株式会社 IHI シンバウラ
 岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
 TEL:086-944-6528

責任技術者	作業者
H28.4.20 	H28.4.20