

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

02-54249

No. 220111

配布先	客先	納入先	新鋭工業 株式会社 東京支店 殿	機種	OED-1000
環営	環品	顧客名	やまだ胃腸内科小児科クリニック 様	機番	100689
		所在地	栃木県宇都宮市鶴田町 718-2	納入日	2013 年 05 月 09 日
		点検者	中澤一裕	作業時間	
		受付日	2021 年 12 月 20 日		
計	3	返送先	納入先と同じ	出荷日	2022 年 01 月 05 日

修理依頼・不具合内容

水温高異常（E:206）

水槽にお湯（50 度以上）が供給されると異常終了します。

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検および作業内容

常温の水を供給しただけで異常が再現することを確認しました。

水温を監視する「温度センサー」の検知不具合が原因で、接点を調整して復旧しました。
また、念のためにセンサーからの信号を受け付ける コントロール基板※ を交換しました。

写真：コントロール基板



[2] 作業内容

- 1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.72ppm・・・正常
- 3：運転確認・・・・・・正常
- 4：装置情報 交換後運転回数：48 殺菌：145、殺菌＋アルコール：951、リークチェック：0
自己洗浄：926、アルコール単独：1、エア単独：0

[3] コントロール基板

諸般の事情から代替部品の調達も困難になっており、誠に勝手ながら「OED-1000S型」に仕様変更させていただきます。操作についての詳細は別紙をご参照ください。
大変ご迷惑をおかけしますが何卒ご理解・ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	コントロール基板（1000→1000S 型）	1 枚	Ver0209/T05C

承認

松
22.01.11
永

審査

中
22.01.11
澤

作成

R04.1.11

中澤

2022 年 1 月 吉日

お客様各位

株式会社IHI物流産業システム

オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 タッチパネル画面変更のお知らせ

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は弊社製品にご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、諸般の事情からコントロール基板の調達が困難となり、新型の基板に変更させていただきました。これに伴いタッチパネルの操作が下記の通り変更になります。

ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記


1：起動と終了画面

起動画面・・・「OED-1000」から「OED-1000S」に表記が変わりました

終了画面・・・終了ボタンを1秒長押し⇒終了ボタンを押して「はい」を押してください


2：処理選択画面

ボタンの表記が「殺菌」→「消毒」になりました。操作に変更はありません。

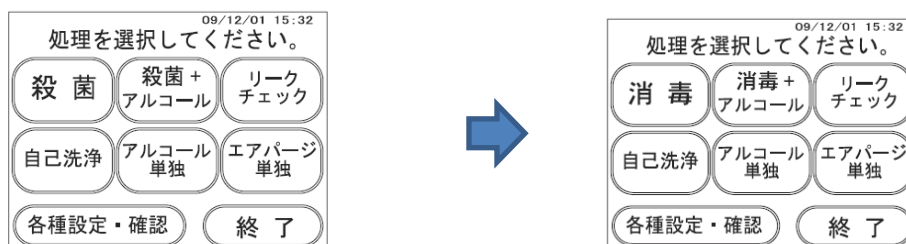

3：「消毒」「消毒+アルコール」画面

- ・シャワー工程は「実施」にしてください
- ・作業者、内視鏡を選択する場合は「処理情報入力」ボタンを押してください

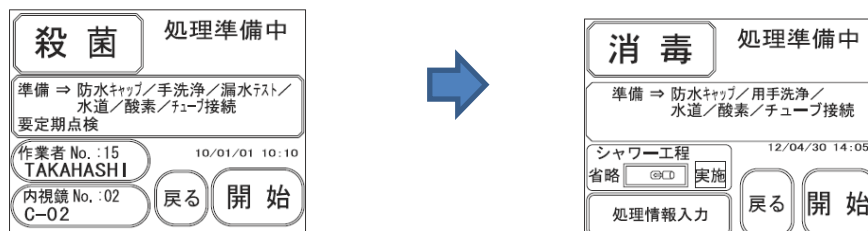

4：その他 冷却ファン動作音

基板に冷却ファンを追加しました。このためタッチパネルで「終了」ボタンを押しても小さい作動音がします。気になる場合は背面側の電源スイッチを切ってください

—以上—