

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和 4 年 1 月 21 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300108
作業年月日	令和 4 年 1 月 21 日	作業時間： Hr
顧客名	原医院 様	TEL： 048-864-6662
所在地	埼玉県さいたま市南区曲本4-10-11	ご担当 様
販売店	(株)メディセオ 埼玉支店	ご担当 様
納入年月日	2013 年 9 月 27 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☒	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

ディスプレイが表示されない(主電源ON/OFFしても表示しない)

不具合原因、作業内容

カラータッチパネル(ディスプレイ) 交換後復帰
急ぎ、関連部品も交換(コントロール基盤)、過去の履歴が見えなくなる。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 318
オゾンセンサ	正常 ☒ 0	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

修理後、復帰。ディスプレイがカラーになりました。主電源 ON 時小さな音が出ますが問題ありません。修理費 ¥ 22,800 (税別) とりました。

装置情報	交換後運転回数： — 更新(リセット)実施・未実施	殺菌/消毒： —	殺菌/消毒+アル： —
	リークチェック： — 自己洗浄： —	アルコール単独： —	エア単独： —

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
カラータッチパネル		☒	1			☐	
コントロール基盤	サ-ビス	☒	1			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2022 年 1 月 21 日

ご署名

原 貴之

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL：03-3816-0444

責任技術者

作業者

