

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者: IHIシバウラ 小山

点検年月日	平成21年 3月 19日	機種名	ONW-10	製造機番	274
設置場所	加古郡播磨町	内視鏡室		TEL	
設置時期		使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>		
フィルタリセット釦	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>		
運転/停止釦	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>		
アルコールモード釦	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>		
ランプ類						
操作パネル	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>		
蛍光灯	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>		
洗浄動作						
フタロック	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
給水	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
細管洗浄 順方向	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
細管洗浄 逆方向	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
細管洗浄 エアパージ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
アルコールフラッシュ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
オゾン分解ファン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
排水	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
異常音、振動	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
性能確認						
オゾン水濃度	正常	<input type="checkbox"/>	濃度:	0.3	mg/L	
オゾンインジケータ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>				
酸素発生	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	濃度:	92.0%	流量:	0.78 L/min
			圧力:	0.120~0.240 MPa		
水漏れ確認						
装置外	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
装置内	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
清掃						
外装	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	清掃	<input type="checkbox"/>		
内部	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	清掃	<input type="checkbox"/>		
洗浄コネクタ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
洗浄チューブ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 <input type="checkbox"/>	一式	
吸湿筒	交換 <input type="checkbox"/>	一式	
ドレン用フィルタ	交換 <input checked="" type="checkbox"/>	一個	
オゾン分解触媒	交換 <input checked="" type="checkbox"/>	一個	

年 3月19日

清水クリニック 印