

修理報告書（引き取り修理）

修理依頼番号

03-06665

No. 071127

配 布 先		納 入 先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿			機 種	ONW-10
客先	1	所 在 地				機 番	000357
環営	1						
防品	1						
		ユーザ名	井上医院 様			納 入 日	
		修 理 者	中澤一裕	作業時間		受 付	2007 年 9 月 6 日
		返 送 先	納入先と同じ			発 送 日	2007 年 11 月 27 日
計	3						

修理依頼・苦情内容

PSA改修後エラー9が出るようになった。（改修工事で排水ホースの位置が変わったため）
排水ホースの高さは床から80cm

不具合原因（故障箇所）と処置内容

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

洗浄中に洗浄槽の水位が高くなったことを水位センサーが検知してエラー9を発報します。
排水ホースの位置とエラーの因果関係を確認するために高さの条件を振って約40回
運転しましたが、異常は再現しませんでした。

エラーの推定原因として以下が考えられますが、②、③-1、③-3は問題ありませんでした。

- ①設置場所の床面が装置背面側に低く傾いている。
- ②水位センサーの劣化、誤作動。
- ③洗浄中に排水が間に合わず水位が高くなる
 - ③-1 排水ポンプの性能低下。
 - ③-2 排水ホースの折れ、ゴミ、出口側の閉塞など。
 - ③-3 サブタンク内に異物が流れ込んだ。

今回排水ポンプを新品に交換しましたので、設置場所と排水ホースの取り回しを今一度
ご確認いただき、様子を見て下さいますようお願い致します。

運転カウンタ：1015回

[2] 修理・点検内容

1. 排水ポンプ交換
2. フタパッキン交換
3. 蓋ヒンジ部グリスアップ
4. 給水減圧弁ストレーナ清掃
5. 運転確認 異常なし インジケータ変色 異常なし

—以上—

交換部品

承認	
審査	
作成	
H19.11.27	
中澤	

部品番号	部品名称	数量	備考
	排水ポンプ	1	P-3
	フタパッキン	1	