

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

03-06538

No. 090917

配 布 先		納 入 先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿			機 種	ONW-10
客先	1	所 在 地	兵庫県姫路市香寺町犬飼502			機 番	000551
環営	1						
防品	1						
		ユ-ザ-名	日並外科医院 様			納 入 日	平成16年12月20日
		点 検 者	中澤一裕	作業時間		受 付 日	平成21年7月31日
		返 送 先	納入先と同じ			出 荷 日	平成21年9月16日
計	3						

修理依頼・苦情内容


エラー8（オゾンガス異常）

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

オゾンセンサーが故障しており、エラー8を発報しました。

（写真参照）

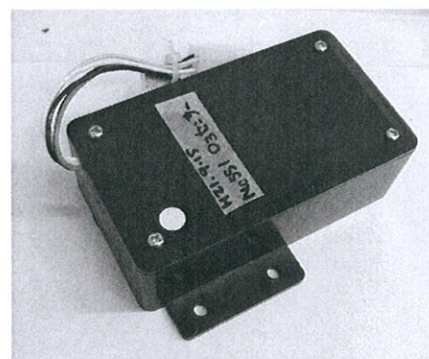

[2] 修理・点検内容

- オゾンセンサー交換
- 定流量弁清掃、排気ホース清掃
- フタロック調整
- アッパーカバーと洗浄水槽の隙間を防水シール剤（シリコーンシーラント）充填
- オゾン水濃度測定：0.45～0.53mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：92.1% 酸素流量：0.78L/min 圧力：0.129～0.221Mpa
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常

—以上—

交換部品

承認				
審査	部品番号	部品名称	数量	備考
		オゾンセンサー	1	FIS 090225
作成				
H21.9.17 中澤				