

内視鏡洗浄機(ONW-10)作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ

防災環境事業部 品質保証部

日付: H19

改修実施者

ONW-10機番: 1127

PSA機番: NPS-1172

吸着筒・吸湿筒・電磁弁ユニット・ハーネスの交換

1. 新しい吸着筒と交換したか(筒の横にSPS-……と表示してある)
2. チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと
3. 取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか
4. 配線は間違いなく、番号通りに奥まで差し込んであるか
5. 各ユニットへの配管は間違いはないか?

合/否
合/否
合/否
合/否
合/否

圧力スイッチの設定

6. 圧力スイッチを設定したか
- UNDモードをHYSモードに変更
- 設定値P-1 0.400Mpaに設定
7. 0点の調整はしたか

合/否
合/否
合/否
合/否

プログラムの書き換え

8. プログラムは書き換えたか(Ver10.8)

合/否

確認試験

9. 本洗浄中にP1が動作し、洗浄槽内の左下から泡が出ていることを確認する
10. 本洗浄中にP2が動作し、順洗、逆洗、AIRパージ、給水が確実にに行われていることを確認する
11. 運転中各部に異音、振動がないこと
12. アルコールフラッシュによりアルコールタンクの水位が確実に下がったことを確認する(約50±10cc)
13. 酸素濃度の確認(運転開始から約3分後)(90%以上) (92 %)
14. 酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min) (0.76 L/min)
15. PSA圧力の確認 空運転時 (Mpa) ~ (Mpa) 参考値
16. チップスイッチを戻したか
17. 確認後濃度計・流量計を外し配管を確実に戻したか
18. フタロックは確実にかかるか
19. 運転は正常か、エラーはでないか
20. インジケータの変色は良好か

合/否
合/否
合/否
合/否
合/否
合/否
参考値
合/否
合/否
合/否
合/否
合/否

確認事項

21. フタパッキンは交換したか
22. 洗浄コネクタのパッキン、Oリングは正常か
23. 洗浄槽・排水パイプ・下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)
24. 定期メンテナンスシールは所定の位置に貼り付けられているか

合/否
合/否
合/否
合/否

外装の取付

25. オゾンセンサーは配線したか
26. フロントパネルのランプは配線したか(スタートボタンを押しランプの点灯確認、エラーは解除のこと)
27. フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か

合/否
合/否
合/否

不具合内容・特記事項(否の場合、NO.と共に理由を記入)

3/15
2/15

ユーザー名: たかひ内科 医院