

内視鏡洗浄機(ONW-10)作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ

防災環境事業部 品質保証部

日付: H.20 10.9 改修実施者 山田
 ONW-10機番: 00/235 PSA機番: SPN-1157

吸着筒・吸湿筒・電磁弁ユニット・ハーネスの交換	
1. 新しい吸着筒と交換したか(筒の横にSPS-……と表示してある)	☒ 合 / ☐ 否
2. チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	☒ 合 / ☐ 否
3. 取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	☒ 合 / ☐ 否
4. 配線は間違いなく、番号通りに奥まで差し込んであるか	☒ 合 / ☐ 否
5. 各ユニットへの配管は間違いはないか?	☒ 合 / ☐ 否
圧力スイッチの設定	
6. 圧力スイッチを設定したか	☒ 合 / ☐ 否
UNDモードをHYSモードに変更	☒ 合 / ☐ 否
設定値P-1 0.400Mpaに設定	☒ 合 / ☐ 否
7. 0点の調整はしたか	☒ 合 / ☐ 否
プログラムの書き換え	
8. プログラムは書き換えたか(Ver10.8)	☒ 合 / ☐ 否
確認試験	
9. 本洗浄中にP1が動作し、洗浄槽内の左下から泡が出ていることを確認する	☒ 合 / ☐ 否
10. 本洗浄中にP2が動作し、順洗、逆洗、AIRパージ、給水が確実にに行われていることを確認する	☒ 合 / ☐ 否
11. 運転中各部に異音、振動がないこと	☒ 合 / ☐ 否
12. アルコールフラッシュによりアルコールタンクの水位が確実に下がったことを確認する(約50±10cc)	☒ 合 / ☐ 否
13. 酸素濃度の確認(運転開始から約3分後)(90%以上) (<u>91.5</u> %)	☒ 合 / ☐ 否
14. 酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min) (<u>0.82</u> L/min)	☒ 合 / ☐ 否
15. PSA圧力の確認 空運転時 (Mpa) ~ (Mpa)	参考値
16. チップスイッチを戻したか	☒ 合 / ☐ 否
17. 確認後濃度計・流量計を外し配管を確実に戻したか	☒ 合 / ☐ 否
18. フタロックは確実にかかるか	☒ 合 / ☐ 否
19. 運転は正常か、エラーはでないか	☒ 合 / ☐ 否
20. インジケータの変色は良好か	☒ 合 / ☐ 否
確認事項	
21. フタパッキンは交換したか	☒ 合 / ☐ 否
22. 洗浄コネクタのパッキン、Oリングは正常か	☒ 合 / ☐ 否
23. 洗浄槽・排水パイプ・下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	☒ 合 / ☐ 否
24. 定期メンテナンスシールは所定の位置に貼り付けられているか	☒ 合 / ☐ 否
外装の取付	
25. オゾンセンサーは配線したか	☒ 合 / ☐ 否
26. フロントパネルのランプは配線したか(スタートボタンを押しランプの点灯確認、エラーは解除のこと)	☒ 合 / ☐ 否
27. フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	☒ 合 / ☐ 否

不具合内容・特記事項(否の場合、NO.と共に理由を記入)

~~3~~ 3箇所で変色確認 O.K.

ユーザー名: 南草津病院