

点検確認書

新型PSA改修作業

株式会社 IHI シパウラ
環境事業部

点検担当者: 中澤-15

点検年月日	平成21年11月27日	機種名	ONW-10	製造機番	1166
設置場所				TEL:	
設置時期		使用時間	1350回	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☒ 定流量弁
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☒ 排気ホース
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.69 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒		0.099
酸素発生	正常	☒	濃度: 94.1 % 流量: 0.8 L/min 圧力: ~0.180 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☒
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☐	調整	☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☒	一個	運転プログラム Ver5 → Ver10 更新
吸湿筒	交換 ☒	一個	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	未交換 ☐	一個	
オゾンセンサー	交換 ☒	一個	
フタパッキン	交換 ☒	一枚	
フィルタ-2	取付 ☒	一個	
			年 月 日



印

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。