

管理 No.

保守点検・修理 報告書

発行日 平成 24 年 3 月 29 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	No. 100185	
作業年月日	平成 24 年 3 月 29 日		作業時間	Hr	
顧客名	奈良市立月ヶ瀬診療所		TEL	0743-92-0030	
所在地	奈良市月ヶ瀬尾山 2790 番地		担当	様	
販売店	(株) スズケン		担当	様	
納入年月日	平成 23 年 2 月 3 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐			修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合状況は特になし			
不具合原因、作業内容			
点検作業実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バル数 340
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常ありませんでした。			

装置 情報	交換後運転回数：	35	更新（リセット）	実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌：	0	殺菌+7L：	35
	リークチェック：	70	自己洗浄：	2	7L単独：	0	エア単独：	1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
脱気フィル		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

H24 年 3 月 29 日

奈良市立月ヶ瀬診療所
ご署名 藤原 靖士 印修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL : 06-6228-3311

責任技術者	作業者