

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号	03-15341	No. 121129
--------	----------	------------

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿			機種	ONW-10
客先	所在地	奈良県天理市柳本町1102番地			機番	001274
環営	ユーザー名	高宮病院 様（定期メンテナンス契約）			納入日	平成19年10月04日
	点検者	小野定之	作業時間	2Hr	受付日	平成24年11月01日
	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成24年11月28日
計	2					

修理依頼・苦情内容

排水ポンプ劣化による異音多発

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

水ポンプが性能劣化して大きな音（異音）が発生しました。
ONW-10は水ポンプを3台搭載しており、これを全て交換しました。



[2] 修理・点検内容

- 部品交換：下表と写真をご参照ください。
- オゾン水濃度測定：0.61～0.68mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：90.5％ 酸素流量：0.77 L/min 圧力：0.107～0.203MPa（AC100V、60Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常

ー以上ー

推奨 交換 部品

承認				
作成2	部品番号	部品名称	数量	備考
H24.11.30 中澤	762301130	水ポンプ（P-1）	1台	オゾン水製造ポンプ
	762301130	水ポンプ（P-2）	1台	内視鏡洗浄ポンプ
	762301130	水ポンプ（P-3）	1台	排水ポンプ
作成1				
H24.11.29 小野				