

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号 NO. 03-15504 No. 130415

納入先	新鋭工業株式会社 大坂支店 殿			機種	ONW-10
所在地	兵庫県伊丹市西台1-5-7 伊丹ファミリーハイツ			機番	000933
ユーザー名	やまだクリニック 様			納入日	平成17年12月1日
点検者	小野定之	作業時間	3Hr	受付日	平成24年11月6日
返送先	納入先と同じ			出荷日	平成25年4月15日

修理依頼・苦情内容

・給水不足表示 その後エラー“4”表示（レベルセンサー異常）
* 4回程度つづき現在エラー出ず

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

- ・納入時 再現運転を6回実施 給水不足およびエラー“4”は発生せず (H24.11月)
 - ・修理依頼時 再度運転確認を実施 給水量不足発生 (H25.4月)
 - ・その他 水ポンプより異音発生 アルコールの減少
- 原因と処置) ・給水量不足およびエラー“4”の原因である水位レベルセンサーの交換 (写真1)
・アルコールの減少であるアルコールバルブ（3個ASSY）の交換 (写真1)
・性能劣化によるチューブ・パッキンの交換 (写真1)
・異音原因である水ポンプの交換（P-1・P-2・P-3） (写真2)

写真1)

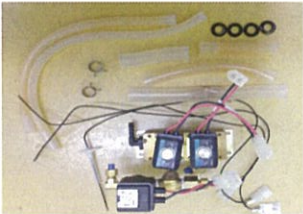


写真2)



[2] 修理・点検内容

1. 部品交換：下表と写真をご参照ください。
2. オゾン水濃度測定：0.40～0.59mg/L ・ ・ 正常
3. P S A（酸素発生装置）性能点検 ・ ・ 正常
酸素濃度：90.9 % 酸素流量：0.76 L/min 圧力：0.098～0.173MPa（AC100V、60Hz）
4. 運転動作確認 ・ ・ 正常
5. オゾンインジケータ変色 ・ ・ 正常

—以上—

推奨 交換 部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	水ポンプ	3 個	
	アルコールバルブ（3 個 ASSY）	1 個	
	水位レベルセンサー	3 本	
	チューブ・パッキン	1 式	

承認

25.4.16

中

25.4.16

澤

作成

13.4.16

小

野