

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

NO.03-13873

No.130411

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店	殿	機種	ONW-10
客先	所在地	兵庫県揖保郡太子町立岡 123		機番	000928
環営	ユーザー名	二の丸内科	様	納入日	平成18年1月16日
	点検者	小野定之	作業時間	受付日	平成24年8月16日
	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成25年4月11日
計					

修理依頼・苦情内容

・排水異常（洗浄後、排水を繰り返し使用できず）

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

- ・再現確認運転を幾度も幾日も繰り返し行ないましたが排水異常の確認はできませんでした。
- ・再現しないまま 本機返却依頼を頂き返却準備の為 再度運転確認を10回実施しました。その内3回目の運転で排水異常が1回だけ発生しました。

原因) 水位レベルセンサー（LVL）および排水ポンプ（P-3）の性能劣化によるものと思われます。

処置) 水位レベルセンサー（LVL）および排水ポンプ（P-3）の交換を実施しました。（無償）

写真1)

水位レベルセンサー（LVL）
排水ポンプ（P-3）



[2] 修理・点検内容

1. 部品交換：下表と写真をご参照ください。
2. オゾン水濃度測定：0.46～0.70mg/L・・・正常
3. P S A（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：92.1% 酸素流量：0.78 L/min 圧力：0.102～0.193MPa（AC100V、60Hz）
4. 運転動作確認・・・正常
5. オゾンインジケータ変色・・・正常

一以上一

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
762301210	水位レベルセンサー	1本	
762301130	排水ポンプ	1台	

承認
安 25.4.12 田
審査
中 25.4.11 澤
作成
小 13.4.11 野