

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

03-14762

No. 130611

|     |       |                 |      |      |     |                   |
|-----|-------|-----------------|------|------|-----|-------------------|
| 配布先 | 納入先   | 新鋭工業株式会社 大阪支店 殿 |      |      | 機種  | ONW-10            |
| 客先  | 所在地   | 兵庫県西宮今津水波町 6-30 |      |      | 機番  | 001221            |
| 環営  | ユーザー名 | 谷向病院 様          |      |      | 納入日 | 平成 18 年 12 月 15 日 |
|     | 点検者   | 小野定之            | 作業時間 | 3 Hr | 受付日 | 平成 25 年 4 月 25 日  |
| 計   | 返送先   | 納入先と同じ          |      |      | 出荷日 | 平成 25 年 6 月 11 日  |

修理依頼・苦情内容

- ・エラー“H” 排水異常  
(使用できなくなる事が最近多い)

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

- 再現運転) ・ 10回運転確認を実施しましたが、再現しませんでした。  
原因) ・ 水ポンプ周辺に水跡が確認され洗浄槽より溢れた水が水位センサーコネクタ (LVL) にかかり誤作動を起こしエラーが発生したと思われます。  
処置) ・ 水位センサー (LVL) および排水ポンプ (P-3) の劣化も原因の要因と思われます。  
・ 水位センサー (LVL) および排水ポンプ (P-3) の部品交換 写真1) 参照  
・ 洗浄槽水溢れ処置 ホース内に栓 (濃度測定用ホース) 写真2) 参照  
・ 水位センサー (LVL) コネクタ部水防止対策 (ビニールによるカバー) 写真3) 参照  
・ 他、フタスプリング劣化による部品交換 写真1) 参照



写真1)



写真2)



写真3)

〔2〕修理・点検内容

- 部品交換：下表と写真をご参照ください。
- オゾン水濃度測定：0.43～0.67mg/L ・ 正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検 ・ 正常  
酸素濃度：91.2 % 酸素流量：0.82L/min 圧力：0.116～0.202MPa (AC100V、60Hz)
- 運転動作確認 ・ 正常
- オゾンインジケータ変色 ・ 正常

—以上—

交換部品

|    |           |                  |     |      |
|----|-----------|------------------|-----|------|
| 承認 | 部品番号      | 部品名称             | 数量  | 備考   |
| 審査 | 762301130 | 水ポンプ (P-3 排水ポンプ) | 1 台 | 写真1) |
|    | 762301210 | 水位レベルセンサー(LVL)   | 1 本 | 写真1) |
|    | 762872261 | フタスプリング          | 4 個 | 写真1) |
| 作成 |           |                  |     |      |
|    |           |                  |     |      |
|    |           |                  |     |      |