

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

03-15066

No. 130226

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿		機種	ONW-10
客先	所在地	神戸市中央区波止場2番1号		機番	001434
環営	ユーザー名	ホテルオークラ神戸クリニック 様		納入日	平成19年9月28日
	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成24年9月7日
計	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成25年2月26日

修理依頼・苦情内容

排水時に「18」が点滅する（総合メンテナンスご契約ユーザー様）

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

機械内部に残水があると「18」を点滅して排水します。この動きは正常ですが工場では確認出来ませんでした。排水能力が低下すると機械内部に水が残しやすいことが考えられるので、排水に関係する部品を交換いたしました。

また総合メンテナンス契約に伴い、定期交換部品の交換を実施しました。

写真1：コントロール基板、排水ポンプ

写真2：定期交換部品一式



[2] 修理・点検内容

1. 部品交換：下表と写真をご参照ください。

2. オゾン水濃度測定：0.6 mg/L・・・正常

3. PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常

酸素濃度：93.9% 酸素流量：0.76 L/min 圧力：0.101～0.192 MPa（AC100V、60Hz）

4. 運転動作確認・・・正常

5. オゾンインジケータ変色・・・正常

運転カウンタ：13183回

—以上—

承認



審査



作成

H25.2.26

中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	吸着筒・吸湿筒	1式	
	オゾン分解触媒	1個	
	ドレンフィルター	1個	
	排水ポンプ（P-3）	1台	
	コントロール基板	1枚	