

管理 No.

保守点検・修理 報告書

発行日 平成 25 年 6 月 17 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100450
作業年月日	平成 25 年 6 月 17 日		作業時間:	1.5 Hr
顧客名	おいそ内科		TEL:	06-6711-0701
所在地	大阪府 大阪市平野区瓜破東2丁目10-13		担当	様
販売店	(株) エム・キャスト		担当	
納入年月日	平成 24 年 3 月 15 日 4/3	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 / 回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

保守点検実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 450
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	タッチパネル時計	正常 ☒ 調整

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

異常ありませんでした。

運転プログラム Ver.0105 → Ver.0107 にバージョンアップしました。操作上変わりありません

装置情報	交換後運転回数: 173 → 0 更新 (リセット) (実施) ・未実施	殺菌:	6	殺菌+7L:	169
	リークチェック: 0	自己洗浄:	165	7L単独:	3
				エア単独:	0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用7Lバルブ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

25 年 6 月 17 日

ご署名 大崎 龍太 (大崎印)

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
(中沢)	IMIシバウラ (中沢)