

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

03-16003

No. 131107

配 布 先		納 入 先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿			機 種	ONW-10
客先	1	所 在 地	神戸市灘区備後町3丁目2番18号			機 番	001432
環営	1						
		ユ-ザ-名	西病院 様			納 入 日	
		点 検 者	中澤一裕	作業時間	2 H r	受 付 日	平成25年10月9日
計	2	返 送 先	納入先と同じ			出 荷 日	平成25年11月5日

修理依頼・苦情内容

エラー2（洗浄中水位低下）

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

排水シリコンチューブが劣化して、水槽の水が排水側に漏れていました。
このため洗浄中に水位が徐々に低下してエラー2が発生しました。
また水位センサーと水ポンプが性能劣化していましたので交換しました。

写真：交換部品一式



[2] 修理・点検内容

- オゾン水濃度測定：0.44～0.5 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：92.7% 酸素流量：0.79 L/min 圧力0.124～0.216 MPa（AC100V、60Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常
運転カウンタ：4762回

—以上—

交換部品

承認	安 2511-7 田				
審査	中 2511-7 澤	部品番号	部品名称	数量	備考
			排水シリコンチューブ	1本	
			水位レベルセンサー（L,H,HH）	3本	水位低、高、高高
			水ポンプ（P-1）	1台	オゾン水製造ポンプ
			水ポンプ（P-2）	1台	内視鏡洗浄ポンプ
			水ポンプ（P-3）	1台	排水ポンプ
作成					
H25.11.7 中澤					