

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

03-15848

No. 140117

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿			機種	ONW-10
客先	所在地	大阪府大阪市東淀川区瑞光4-1-18			機番	000856
環営	ユーザー名	近藤内科クリニック 様			納入日	平成17年11月30日
	点検者	中澤一裕	作業時間	4Hr	受付日	平成25年9月25日
計	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成26年1月14日

修理依頼・苦情内容

「水漏れ」修理および各部点検

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）


修理遅れまして大変申し訳ありませんでした。

機械を分解点検したところ、水ポンプ（P-1）出口側チューブに亀裂が発生しておりそこから水が漏れていました。
このほかに劣化した部品を交換し、あわせて定期交換部品を交換しました。

写真1：定期交換部品一式



写真2：オゾン水系統配管、排水電磁弁

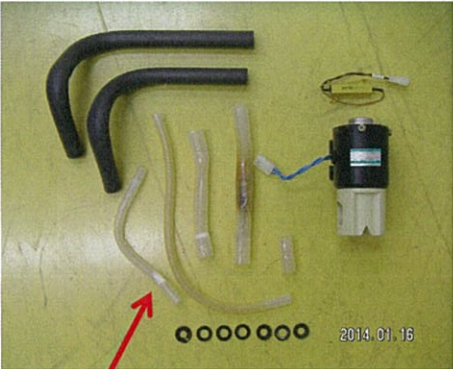

[2] 修理・点検内容

- 部品交換：下表と写真をご参照ください
- オゾン水濃度測定：0.47～0.61 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：95.2% 酸素流量：0.81 L/min 圧力 0.099～0.183 MPa（AC100V、60Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常
運転カウンタ：956回

水漏れ箇所

承認

安
26.1.17
田

審査

中
26.1.17
澤

作成

H26.1.17
中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	オゾン水系統配管	1式	
	排水電磁弁（電磁弁駆動用抵抗含む）	1個	
定期交換部品	吸着筒、吸湿筒	1式	SPS-11433
定期交換部品	ドレンフィルター	1個	
定期交換部品	オゾン分解触媒	1個	