

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

03-15455

No. 140106

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿			機種	ONW-10
客先	所在地	大阪府豊中市桜塚二丁目23-12			機番	000881
環営	ユーザー名	備仲医院 様			納入日	平成17年10月4日
	点検者	中澤一裕	作業時間	4 Hr	受付日	平成25年7月29日
計	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成26年1月6日

修理依頼・苦情内容

- ・運転中異常音が発生する
- ・フタ開閉不良
- ・トレイ背面側部品（ｽﾍﾟｰｻﾞﾞﾛｯｸ）脱落
- ・「給水量不足」異常（工場点検中に発生）

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

- ・異常音・・・水ポンプの劣化が原因で発生しました。
- ・フタ開閉不良・・・フタスプリングが折損していました。
- ・給水量不足異常・・・水位センサーの検知感度が低下しておりました。
- ・ｽﾍﾟｰｻﾞﾞﾛｯｸ脱落・・・1か所外れていましたので再度接着いたしました

写真1：トレイ背面（ｽﾍﾟｰｻﾞﾞﾛｯｸ）

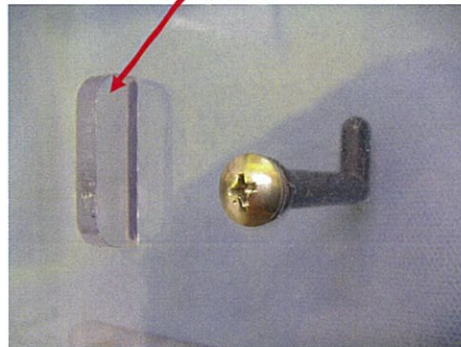


写真2：レベルセンサー、フタスプリング、水ポンプ



[2] 修理・点検内容

- 部品交換：下表と写真2をご参照ください
- オゾン水濃度測定：0.42～0.52 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：92.2% 酸素流量：0.77 L/min 圧力0.118～0.206 MPa（AC100V、60Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常
運転カウンタ：5175回

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	水位レベルセンサー（L,H,HH）	3本	水位「低」「高」「高高」
	フタスプリング	4個	
	水ポンプ	3台	P-1、P-2、P-3
	排水シロコチューブ、定流量弁ﾎﾞｯｷﾝ	1式	無償

承認

安
26.1.6
田

審査

中
26.1.6
澤

作成

H26.1.6
中澤