

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

03-16653

No. 140304

納入先	新鋭工業（株）大阪支店 殿			機種	ONW-10
所在地	大阪府高槻市柳川町2丁目14-21			機番	001534
ユーザー名	西野医院 様			納入日	平成20年 3月21日
点検者	中澤一裕	作業時間	3 Hr	受付日	平成26年1月6日
返送先	納入先と同じ			発送日	平成26年2月20日

修理依頼・異常内容

洗浄後、水槽内に残水がある

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

- ・残水につきまして
洗浄終了後も水槽内に水が残っている現象を確認しました。分解点検したところ
排水電磁弁、排水ポンプ入口側のチューブが劣化して、排水能力が低下していました。
- ・PSA（酸素発生装置）やオゾン分解触媒に性能低下がみられましたので部品交換しました。

写真：交換部品一式



〔2〕修理・点検内容

1. 部品交換（下表と写真をご参照ください）
2. オゾン水濃度測定：0.48～0.61 mg/L ・ ・ 正常
3. P S A（酸素発生装置）性能点検 ・ ・ 正常
酸素濃度：93.9 % 酸素流量：0.76 L/min 圧力：0.095～0.177 MPa
部品交換前：84.0 %
4. 運転確認 異常なし。オゾンインジケータ変色 異常なし。
5. 運転回数：875

一以上一

交換部品

部品コード	部品名称	数量	備考
	P S A（酸素発生装置）		
	吸着筒、吸湿筒	1 式	SPS-11450
	ドレンフィルター	1 個	
	オゾン分解触媒	1 個	
	排水系統配管チューブ	1 式	定流量弁用パッキン含む

承認



審査



作成

H26. 3. 4
中澤