

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

03-16091

No. 13219

納入先	新鋭工業（株）大阪支店 殿		機種	ONW-10
所在地	兵庫県神戸市須磨区飛松町 5-2-1		機番	001566
ユーザー名	八十嶋病院 様 （定期点検契約）		納入日	平成 20 年 8 月 26 日
点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成 25 年 11 月 3 日
返送先	納入先と同じ		発送日	平成 26 年 2 月 19 日

修理依頼・異常内容

水槽の底から水漏れ

※新鋭工業殿が現地で水槽底部が割れた状態を確認しました。

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

水漏れにつきまして

洗浄槽底部の亀裂を確認しました。何らかの衝撃が加わって底部が割れたと推測します。
亀裂部分を接着し、その上を溶接して補修しました。（写真をご参照ください）

写真1：洗浄槽底部（矢印の部分）



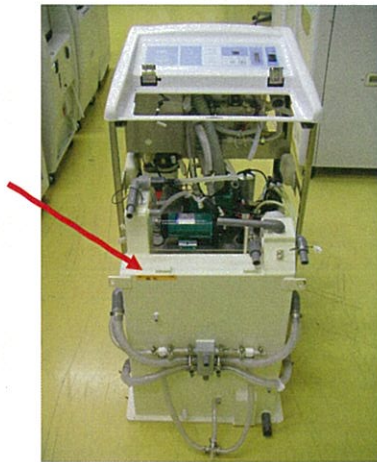


写真2：溶接前（上） 溶接後（下）

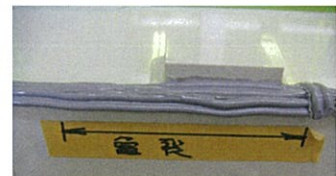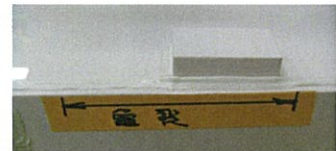

[2] 修理・点検内容

- 部品交換及び水槽補修（下表と写真をご参照ください）
- オゾン水濃度測定：0.54～0.65 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：92.6% 酸素流量：0.79 L/min 圧力：0.118～0.202 MPa
- 運転確認 異常なし。オゾンインジケータ変色 異常なし。
- 運転回数：586

一以上一

交換部品

部品コード	部品名称	数量	備考
	排水シリコンチューブ	1本	水槽修理作業に含む
	排水ポンプ入口チューブ	1本	水槽修理作業に含む

承認

安
26.2.19
田

審査

中
26.2.19
澤

作成

H26.2.19

中澤