

# 修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

03-16692

No. 140324

|       |                      |      |     |            |
|-------|----------------------|------|-----|------------|
| 納入先   | 新鋭工業（株）大阪支店 殿        |      | 機種  | ONW-10     |
| 所在地   | 京都府中京区下合町11-8        |      | 機番  | 001253     |
| ユーザー名 | 草場消化器クリニック 様（定期点検契約） |      | 納入日 | 平成18年9月1日  |
| 点検者   | 中澤一裕                 | 作業時間 | 受付日 | 平成26年1月15日 |
| 返送先   | 納入先と同じ               |      | 発送日 | 平成26年3月21日 |

## 修理依頼・異常内容

水漏れ

## 不具合原因（故障箇所）と処置

### [1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

水漏れにつきまして

洗浄槽底部の亀裂を確認しました。何らかの衝撃が加わって底部が割れたと推測します。  
亀裂部分を接着し、その上を溶接して補修しました。（写真をご参照ください）

写真1：洗浄槽底部（矢印の部分）

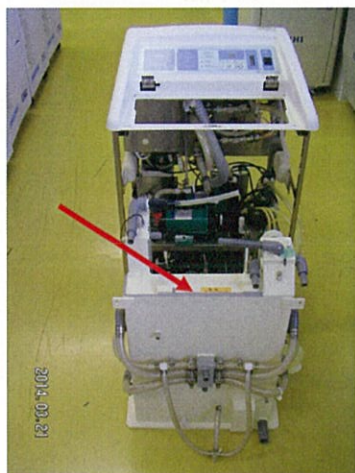


写真2：溶接後



### [2] 修理・点検内容

- 部品交換及び水槽補修（下表と写真をご参照ください）
- オゾン水濃度測定：0.42～0.56 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常  
酸素濃度：92.9 % 酸素流量：0.74 L/min 圧力：0.109～0.193 MPa
- 運転確認 異常なし。オゾンインジケータ変色 異常なし。
- 運転回数：16757（交換済み基板）+8120（現状の基板）=24877

—以上—

## 交換部品

| 部品コード | 部品名称        | 数量 | 備考        |
|-------|-------------|----|-----------|
|       | 排水シリコンチューブ  | 1本 | 水槽修理作業に含む |
|       | 排水ポンプ入口チューブ | 1本 | 水槽修理作業に含む |
|       |             |    |           |

承認

安  
26.3.24  
田

審査

中  
26.3.24  
澤

作成

H26.3.24  
中澤