

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20130613

発行日 平成 25 年 6 月 13 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100445
作業年月日	平成 25 年 6 月 13 日		作業時間:	1.0 Hr
顧客名	岡本医院		TEL:	077-565-3757
所在地	滋賀県 草津市桜ヶ丘5-3-10		担当	様
販売店	滋賀県医師会協同組合		担当	髭白 様
納入年月日	平成 24 年 3 月 9 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

保守点検実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ 表示数 501
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒ 2P
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

異常ありませんでした。

運転プログラム Ver 0107 にバージョンアップしました

装置情報	交換後運転回数: 68 → 0 更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	殺菌: 68	殺菌+7L: 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 35	7L単独: 0
		エア単独: 0	

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コントローラ		☒	1
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日
滋賀県草津市桜ヶ丘5-3-10

〒525-0057 岡本医院

ご署名 医師 岡本 法 伸 印

TEL 565-3757 FAX 565-3761

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
中沢	中沢