

メーカー控

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成 25 年 6 月 13 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100475	
作業年月日	平成 25 年 6 月 13 日		作業時間:	1.0	Hr
顧客名	佐々木クリニック		TEL:	0749-53-1701	
所在地	滋賀県 長浜市小堀町 80-1		担当	様	
販売店	中山医科器械		担当	大石 様	
納入年月日	平成 24 年 5 月 29 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
保守点検実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 568
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒ 2P
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			
異常ありませんでした。			
運転確認終了 Ver0107 にバージョンアップしました。			

装置情報	交換後運転回数: 217 → 0 更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌:	2	殺菌+アル:	215
	リークチェック: 2	自己洗浄:	191	アルコール単独:	0
				エア単独:	0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コントローラ		☒	1
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		平成 25 年 6 月 13 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		ご署名 佐々木 隆夫
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
		修印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
中沢	中沢