

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26 年 1 月 10 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100475
作業年月日	平成 26 年 1 月 10 日		作業時間:	Hr
顧客名	佐々木ワリニツ		TEL:	0749-53-1701
所在地	滋賀県長浜市小堀町 80-1		担当	様
販売店			担当	様
納入年月日	平成 年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒			修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

1/9 オゾン水生成異常 6回

不具合原因、作業内容

オゾン水濃度計用フィルタ(脱気フィルタ)が詰まっております。
これが原因でした。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 405
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 141	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 4	殺菌+7L: 355
	リークチェック: 2	自己洗浄: 315	7L単独: 1	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐				☐	
排水栓		☐				☐	
オゾン水濃度計		☐				☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒				☐	
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 上田 有美子

印

修理業者 株式会社 IHI シバウラ 岡山事業所
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者

H26.1.10



作業者

H26.1.10

