

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

No. 130313

納入先	新鋭工業（株）大阪支店 殿		機種	OED-1000
顧客名	松浦クリニック 様		機番	100461
所在地	兵庫県加古川市尾上町長田 517-48		納入日	平成24年4月10日
点検者	中澤 一裕	作業時間	受付日	平成25年2月28日
返送先	納入先と同じ		出荷日	平成25年3月12日

修理依頼・不具合内容

2/26 排気ファン故障 (E:103)
 現地確認したとき正常に動作していたが、電源付近から異音が生じたため工場へ持ち帰った。


不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果

コントロール基板の不具合が原因でした。
 基板から各部品を動作させる信号が安定せず、排気ファンが動作しなかったり
 リレー（部品を動かすスイッチ）が瞬間的にON-OFFしたのが異音として発生していました。

コントロール基板を交換し、念のため排気ファンを交換して復旧しました。

写真：コントロール基板と排気ファン

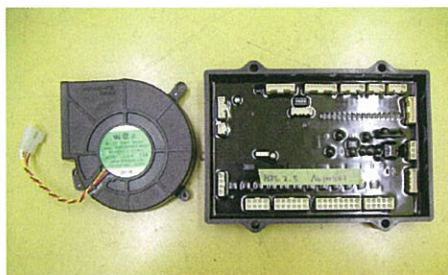

[2] 修理・点検内容

- 1：部品 交換（下表と写真をご参照ください）
- 2：オゾン水濃度測定：0.72ppm・・・正常
- 3：運転確認・・・・・・・・・・・・・正常

—以上—

承認



審査



作成

H25. 3. 13
 中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	コントロール基板	1 枚	電源 ON-OFF 動作確認済み
	排気ファン	1 台	

（株）IHI シバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528