

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成 26年 4月 8日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号	: 300012	
作業年月日	平成 26年 4月 8日		作業時間	:	Hr
顧客名	まつむら胃腸科クリニック 御中		電話番号	: 06-6369-7077	
所在地	大阪府吹田市新芦屋上21-1		ご担当	院長先生 様	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	平成 25年 4月 9日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐	1年 1回目	定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 605
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数 : 319 回	更新 (リセット) (実施) ・ 未実施	消毒 : 74 回	消毒+アル : 246 回
	リークチェック : 244 回	自己洗浄 : 46 回	アルコール単独 : 2 回	エア単独 : 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	< 交換部品製造番号 > オゾン水濃度計 NO. 12061071 → NO. 14011675 オゾンセンサ NO. 120731-016 → NO. 140325-004 オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、 コネクタ継手の4点は製造番号なし
定期交換部品セット		☒	1セット	
排水フィルター		☒	1個	
給水フィルター		☐	1個	
		☐		

お客様ご確認署名欄		2014 年 4 月 8 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		ご署名 印
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		

修理業者	新鋭工業 株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1 TEL : 06-6228-3311	責任技術者	作業者
			中山