

管理 No.

発行日 平成 26年 4月 16日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄機 ONW-10		製造番号	: 871
作業年月日	平成 26年 4月 16日		作業時間	: Hr
顧客名	胡医院 御中		電話番号	: 075-924-2662
所在地	京都府向日市寺戸町永田11-71		ご担当	院長先生 様
販売店			ご担当	様
納入年月日	平成 17年 12月 1日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3年 1回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

点検項目			点検項目		
電源釦	正常	☑	オゾン分解ファン	正常	☑
フィルタリセット釦	正常	☑	排水	正常	☑
運転/停止釦	正常	☑	異常音、振動	正常	☑
アルコールモード釦	正常	☑	オゾンインジケータ	正常	☑
操作パネル	正常	☑	酸素発生	正常	☑
蛍光灯	正常	☑	水漏れ確認 装置外	正常	☑
フタロック	正常	☑	水漏れ確認 装置内	正常	☑
給水	正常	☑	洗浄コネクタ	正常	☑
細管洗浄 順方向	正常	☑	洗浄チューブ	正常	☑
細管洗浄 逆方向	正常	☑			
細管洗浄 エアパーシ	正常	☑			
アルコールフラッシュ	正常	☑			
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					

装置情報	総運転回数: 1591 回	更新 (リセット) 実施 未実施	交換後運転回数: 212 回
酸素発生	濃度: 94.3 %	流量: 0.82 L/min	圧力: 127 ~ 221 MPa

交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	一式
ドレン用フィルタ		☒	一式
吸着筒		☐	一個
吸湿筒		☐	一個
		☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2014 年 4 月 16 日

署名

5月 27日 期

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL : 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山