

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____
発行日 平成 26年 4月 17日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄機 ONW-10		製造番号	: 492	
作業年月日	平成 26年 4月 17日		作業時間	:	Hr
顧客名	うだ医院 御中		電話番号	: 0748-66-1050	
所在地	滋賀県甲賀市土山町北土山 1 684-1		ご担当	院長先生 様	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	平成 17年 6月 1日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3年 1回目	定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

点検項目	点検項目
電源釦 正常 ☒	オゾン分解ファン 正常 ☒
フィルタリセット釦 正常 ☒	排水 正常 ☒
運転/停止釦 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
アルコールモード釦 正常 ☒	オゾンインジケータ 正常 ☒
操作パネル 正常 ☒	酸素発生 正常 ☒
蛍光灯 正常 ☒	水漏れ確認 装置外 正常 ☒
フタロック 正常 ☒	水漏れ確認 装置内 正常 ☒
給水 正常 ☒	洗浄コネクタ 正常 ☒
細管洗浄 順方向 正常 ☒	洗浄チューブ 正常 ☒
細管洗浄 逆方向 正常 ☒	
細管洗浄 エアパージ 正常 ☒	
アルコールフラッシュ 正常 ☒	
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置情報	総運転回数: 2423 回	更新 (リセット) (実施)・未実施	交換後運転回数: 344 回
酸素発生	濃度: 93.5 %	流量: 0.79 L/min	圧力: 121 ~ 211 MPa

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
オゾン分解触媒		☒	一式	吸着筒・吸湿筒
ドレン用フィルタ		☒	一式	NO. → NO.
吸着筒		☐	一個	オゾン分解触媒、ドレン用フィルタは製造番号なし
吸湿筒		☐	一個	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H 26 年 4 月 17 日

ご署名 橋本 陽子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL : 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山