

小池クリニック 御中

## 点検確認書

株式会社 IHIシバウラ  
環境事業部

給水量不足異常 対応

点検担当者： 中澤 裕

|       |                    |      |        |                   |        |
|-------|--------------------|------|--------|-------------------|--------|
| 点検年月日 | 平成26年 5月14日        | 機種名  | ONW-10 | 製造機番              | 000733 |
| 設置場所  | 兵庫県神戸市垂水区上高丸1-7-52 |      |        | TEL: 078-707-9861 |        |
| 設置時期  |                    | 運転回数 | 579    | 御対応者              |        |

| 点検項目       |    | 点検結果                                |       |                                     |          |                          |                          |
|------------|----|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| スイッチ類      |    |                                     |       |                                     |          |                          |                          |
| 電源釦        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換    | <input type="checkbox"/>            |          |                          |                          |
| フィルタリセット釦  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換    | <input type="checkbox"/>            |          |                          |                          |
| 運転/停止釦     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換    | <input type="checkbox"/>            |          |                          |                          |
| アルコールモード釦  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換    | <input type="checkbox"/>            |          |                          |                          |
| ランプ類       |    |                                     |       |                                     |          |                          |                          |
| 操作パネル      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換    | <input type="checkbox"/>            |          |                          |                          |
| 蛍光灯        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換    | <input type="checkbox"/>            |          |                          |                          |
| 洗浄動作       |    |                                     |       |                                     |          |                          |                          |
| フタロック      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整    | <input type="checkbox"/>            | 交換       | <input type="checkbox"/> |                          |
| 給水         | 正常 | <input type="checkbox"/>            | 調整    | <input checked="" type="checkbox"/> | 0.5MPa以上 | 交換                       | <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 順方向   | 正常 | <input type="checkbox"/>            | 調整    | <input type="checkbox"/>            | 交換       | <input type="checkbox"/> |                          |
| 細管洗浄 逆方向   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整    | <input type="checkbox"/>            | 交換       | <input type="checkbox"/> |                          |
| 細管洗浄 エアパージ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整    | <input type="checkbox"/>            | 交換       | <input type="checkbox"/> |                          |
| アルコールフラッシュ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整    | <input type="checkbox"/>            | 交換       | <input type="checkbox"/> |                          |
| オゾン分解ファン   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整    | <input type="checkbox"/>            | 交換       | <input type="checkbox"/> |                          |
| 排水         | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整    | <input type="checkbox"/>            | 交換       | <input type="checkbox"/> |                          |
| 異常音、振動     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整    | <input type="checkbox"/>            | 交換       | <input type="checkbox"/> |                          |
| 性能確認       |    |                                     |       |                                     |          |                          |                          |
| オゾン水濃度     | 正常 | <input type="checkbox"/>            | 濃度:   | mg/L                                |          |                          |                          |
| オゾンインジケータ  | 正常 | <input type="checkbox"/>            | 要点検有感 |                                     |          |                          |                          |
| 酸素発生       | 正常 | <input type="checkbox"/>            | 濃度:   | %                                   | 流量:      | L/min                    | 圧力: MPa                  |
| 水漏れ確認      |    |                                     |       |                                     |          |                          |                          |
| 装置外        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整    | <input type="checkbox"/>            | 交換       | <input type="checkbox"/> |                          |
| 装置内        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整    | <input type="checkbox"/>            | 交換       | <input type="checkbox"/> |                          |
| 清掃         |    |                                     |       |                                     |          |                          |                          |
| 外装         | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃    | <input type="checkbox"/>            |          |                          |                          |
| 内部         | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃    | <input type="checkbox"/>            |          |                          |                          |
| 洗浄コネクタ     | 正常 | <input type="checkbox"/>            | 調整    | <input type="checkbox"/>            | 交換       | <input type="checkbox"/> |                          |
| 洗浄チューブ     | 正常 | <input type="checkbox"/>            | 調整    | <input type="checkbox"/>            | 交換       | <input type="checkbox"/> |                          |

| 交換部品                        | 数量 | コメント                                                                        |
|-----------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 交換 <input type="checkbox"/> |    | 供給圧力が規定より高いため<br>給水電磁弁が開かず異常が出た<br>減圧弁の設置が必要です。<br><br>当分は「運転」を押し蛇口を開いて下さい。 |
| 交換 <input type="checkbox"/> |    |                                                                             |
| 交換 <input type="checkbox"/> |    |                                                                             |
| 交換 <input type="checkbox"/> |    |                                                                             |
| 交換 <input type="checkbox"/> |    |                                                                             |
| 交換 <input type="checkbox"/> |    |                                                                             |

平成19年8月以降「酸素発生」を怠り定期交換部品 平成26年 5月 14日  
を交換していないので、検討をお願いします。

ご署名

印

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。