

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

03-16918

No. 140512

納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿		機種	ONW-10B
所在地	和歌山県和歌山市榎原 204-8		機番	001765
ユーザー名	宇治田循環器科内科 様		納入日	平成 21 年 9 月 15 日
点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成 26 年 3 月 26 日
返送先	納入先と同じ		出荷日	平成 26 年 5 月 9 日

修理依頼・不具合内容

・本体左側より水漏れ

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

内部点検の結果、水漏れの原因となるような不具合はありませんでした。
 本体左側の水が漏れた形跡から、洗浄チューブなどが外れてそこから水が写真1の穴に当たり
 写真2の「通気配管」を経由して内部側に漏れたと推測いたします。
 噴き出しを防止するために通気配管の流路を狭くする対策をいたしました。
 また、アッパーカバーと水槽の隙間にシール剤を再度充填いたしました。

写真1：水槽左側の穴



写真2：本体左側 通気配管



写真3：交換部品一式



[2] 修理・点検内容

1. 部品交換：下表と写真をご参照ください
2. オゾン水濃度測定：0.44～0.56mg/L・正常
3. 運転動作確認・正常（運転カウンタ：1352）
4. オゾンインジケータ変色・正常

—以上—

承認

安
26.5.12
田

審査

中
26.5.12
澤

作成

H26.5.12

中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	水位レベルセンサー；LVL、LVH、LVHH	3本	水位低、高、高高
	オゾン水製造ポンプ；P-1	1台	出口チューブは無償
	内視鏡洗浄ポンプ；P-2	1台	
	排水ポンプ；P-3	1台	
	フタスプリング	4個	
	排水シリコンチューブ	1本	
	オゾン分解触媒	1個	定期交換部品