

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26年 5月 19日

|       |                               |                                          |                                                                  |                                               |                |    |
|-------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----|
| 販売名   | オゾン水内視鏡洗浄機 ONW-10             |                                          |                                                                  | 製造番号                                          | : 1434         |    |
| 作業年月日 | 平成 26年 5月 19日                 |                                          |                                                                  | 作業時間                                          | :              | Hr |
| 顧客名   | ホテルオークラ神戸クリニック 御中             |                                          |                                                                  | 電話番号                                          | : 078-335-2410 |    |
| 所在地   | 兵庫県神戸市中央区波止場町2番1号行財-5神戸7階     |                                          |                                                                  | ご担当                                           | 院長先生           | 様  |
| 販売店   |                               |                                          |                                                                  | ご担当                                           | 様              |    |
| 納入年月日 | 平成 19年 9月 18日                 | 保証期間                                     | 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品                                           |                |    |
| 作業区分  | 保守点検 <input type="checkbox"/> | 総合点検 <input checked="" type="checkbox"/> | 4年 2回目                                                           | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                |    |
| 出張・引取 | 修 理 <input type="checkbox"/>  | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>          |                                                                  |                                               |                |    |

| 点検項目                      |                                        | 点検項目      |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| 電源釦                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン分解ファン  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| フィルタリセット釦                 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排水        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 運転/停止釦                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| アルコールモード釦                 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾンインジケータ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 操作パネル                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 酸素発生      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 蛍光灯                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 水漏れ確認 装置外 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| フタロック                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 水漏れ確認 装置内 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 給水                        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 洗浄コネクタ    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 順方向                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 洗浄チューブ    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 逆方向                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |           |                                        |
| 細管洗浄 エアパージ                | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |           |                                        |
| アルコールフラッシュ                | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |           |                                        |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 |                                        |           |                                        |
|                           |                                        |           |                                        |

|      |               |                   |                   |
|------|---------------|-------------------|-------------------|
| 装置情報 | 総運転回数: 2,270回 | 更新(リセット) (実施)・未実施 | 交換後運転回数: 688 回    |
| 酸素発生 | 濃度: 95.7 %    | 流量: 0.78 L/min    | 圧力: 114 ~ 201 MPa |

| 交換部品名称   | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品製造番号                      |
|----------|-------|-------------------------------------|----|-------------------------------|
| オゾン分解触媒  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 一式 | 吸着筒・吸湿筒                       |
| ドレン用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 一式 | NO. SPS-10987 → NO. SPS-11460 |
| 吸着筒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 一個 | オゾン分解触媒、ドレン用フィルタは製造番号なし       |
| 吸湿筒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 一個 |                               |
|          |       | <input type="checkbox"/>            |    |                               |

## お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名



修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
|       | 中山  |