

修理報告書（引き取り修理）

修理依頼番号

03-05503

No. 070508

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿		機種	ONW-10
客先	所在地			機番	000955
環営	ユーザー名	なかいクリニック 様		受付日	2007年 2月 22日
防品	修理者	中澤一裕	作業時間	出荷日	
計	返送先	納入先と同じ		発送日	2007年 5月 8日


修理依頼・苦情内容

お湯を給水して運転し、水槽とトレーが熱により変形した。

不具合原因（故障箇所）と処置内容

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

- ・温水使用の影響
水槽とトレーは写真のように変形して使用不可のため交換いたしました。
供給された温水の温度は不明ですが給水電磁弁、循環ポンプ（P-1）、洗浄ポンプ（P-2）、排水ポンプ（P-3）は内部目視の結果異常は認められませんでした。
耐熱はそれぞれ80℃です。
- ・PSA（酸素発生機）点検
流量：0.70L/min、酸素濃度：87.2%、圧力：0.114~0.141Mpa
- ・運転カウンタ 385回

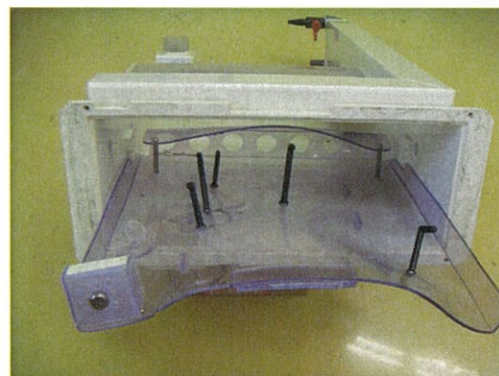

[2] 修理・点検内容

1. 水槽、トレー交換
2. PSA吸着筒、電磁弁交換（SP1015→SPH1268）
交換後 酸素濃度 93.1 %
流量 0.77L/min
圧力 0.095~0.121 Mpa
3. ピンチバルブチューブ交換
4. 運転プログラム Ver 5→Ver 7 変更
5. 運転確認 異常なし
インジケータ変色異常なし

—以上—

交換部品

承認
江 19.5.8 口
審査
江 19.5.8 口
作成
H19.5.8 中澤

部品番号	部品名称	数量	備考
	水槽	1	
	トレー	1	
	吸着筒	1	
	PSA電磁弁	1	
	ピンチバルブチューブ	1	