

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

03-08972

No. 101117

配布先	納入先	新鋭工業（株）大阪支店 殿			機種	ONW-10
客先	所在地	大阪府貝塚市島中1-3-18			機番	000955
環営	ユーザー名	なかいクリニック 様			納入日	平成18年4月6日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間		受付日	平成22年10月8日
	返送先	納入先と同じ			発送日	平成22年11月12日
計	3					

修理依頼・異常内容

エラー4（水位レベルセンサ異常）

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

排水バルブが故障して洗浄槽に水が溜まらない状態になり、これを水位センサ（LVL）が検知してエラー4を発報しました。

写真1：排水バルブ

運転カウンタ：2974回



[2] 修理・点検内容

- 部品交換（下表および写真をご参照ください）
- オゾン水濃度測定：0.54～0.64mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：90.5% 酸素流量：0.75L/min 圧力：0.128～0.226MPa
- 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし

—以上—

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	排水バルブ	1	
	コントロール基板	1	無償

承認



審査



作成

H22.11.17

中澤